



PIRKA postoperatiiviset hoitokengät

- Neuropaattisten ja iskeemisten haavojen kevennyshoidot
- Diabeettiset haavat ■ Kirurgisten operaatioiden jälkihoidot
- Vammojen hoidot ■ Kipsikenkä

CE-hyväksytty, suomalaisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty.

PIRKA hoitojalkineita vuodesta 1996.

www.finbort.fi

Tuote nro S 210 ■ tasapohjainen perusmalli

- Soveltuu käytettäväksi kaikissa kevennyshoidoissa.
- Sopii hyvin ikäihmisille ja tasapaino-ongelmista kärsiville henkilöille.
- Helppo käveltävyys.



Tuote nro S 211 ■ takaa kevennetty

- Kantapään alueen haavaumien kevennyshoidot.
- Saatavana myös avokantaisena.



Tuote nro S 212 / S 213 ■ edestä kevennetty

- Päkiäalueen kevennyshoidot.
- Mallia S 213 käytetään erityisesti hallux-valgus -operaatioiden jälkihoidoissa.



Tuote nro S 214 ■ keinupohja

- Kipsikenkä ja erilaiset kevennyshoidot.
- Saatavana sekä kangas- että nahkapäällisellä.



Tuote nro 215 ■ lyhennetty etukevennyks

- Käytetään ykkösvarpaan ja jalan etuosan kevennyshoidoissa.
- Jalka pysyy stabiilina, ei tule rullausliikettä.



Tuote nro 216 ■ edestä kevennetty kiilapohja

- Jalan etuosan kevennyshoidot.
- Jalka pysyy stabiilina erittäin hyvin.
- Tehokkaasti keventävä.



KOOT:

- * XS = 21,5 cm / 32
- S = 22,5 cm / 34
- M = 24,0 cm / 36
- L = 25,5 cm / 38½
- XL = 27,0 cm / 41
- XXL = 28,5 cm / 43
- XXXL = 30,5 cm / 46
- * XXXXL = 32 cm / 48

* Ei saatavilla kaikkiin malleihin.



Kolmitarra



Avokanta



Umpikärkinen

Evenup ■ korotuspohja

Helppokäyttöinen korotus kaikkiin kenkiin, jos potilas joutuu käyttämään toisessa jalassa esim. haavanhoitokenkää.

KOOT: S 37–39, M 40–43, L 44–48

Voidaan säätää kahteen eri korkeuteen.



HOITOKENKÄ = välittömästi hoitoyksikössä annettava tilapäiseen käyttöön tarkoitettu tehdasvalmisteinen kenkä, joka immobilisoi jalkavaurion (murtuma, haava, leikkaus tms.) ja keventää sitä.

KÄYTTÖOHJE:

Pirka hoitokengän on oltava käyttötarkoitukseen soveltuva.

Tarkista, että hoitokenkä on **OIKEAN KOKOINEN**.

Hoitokengän kärkeen jätävä n. 1–1,5 cm tyhjää tilaa.

HUOM! Hoitokengässä on **AINA OLTAVA POHJALLINEN!**

Luna tai vastaava.



HOITOKENGÄN OIKEA KÄYTTÖ TULEE OPETTAA JA SITÄ PITÄÄ VALVOA.

- Hoitokenkää ei kuormiteta kuten tavallista kenkää, sille varataan osapainolla.
- Etukeventeisellä kengällä (212/213) painopiste on kantapäällä, ei tehdä rullausta loppuun saakka.
- Takakeventeisellä kengällä (211) painopiste tulee jalan etuosalle, voidaan tehdä rullaus askellus.
- Hoitokenkiä käytetään mielellään kyynärsauvojen kanssa, jolloin toimii parhaiten käyttötarkoituksensa mukaisesti.
- Hoitokengän ulkopohja on liukas kosteilla lattiapinnoilla, sekä talvella ulkona liikuttaessa.

KOLMITARRAISEN HOITOKENGÄN TARRANAUHOJEN KIINNITYS



1.

1. Jalassa avattuna 2. Kiinnitetään 3. Valmis



3.



Pirka kevennyskenkä, Evenup korotuspohja ja lisäkevennys kyynärsauvoilla.

MATERIAALIT: *Päällinen* hengittävä, likaa hylkivä ja kulutusta kestävä puuvilla-polyester -kangas. *Ulkopohja* polyuretaani tai solukumi. *Sisäpohja* Luna-pohjallinen.

PESU: Konepestävä +40°C Tasokuivaus huoneenlämmössä.

Ei linkousta. Ei kuivauskaappia. Ei kuivausrumpua. Ei kloorivalkaisua.


Kenkiä ei saa jättää märkinä koneeseen tai pyykkikoriin päällekkäin. Tarrat kiinni pestessä.

Jos KANTAKAPPI on menettänyt muotonsa pesussa, voit muotoilla sen lämpimänä uudestaan.

Kengät kestävät useita pesukertoja oikein huollettuna. Tarkista kierrätettyjen hoitokenkien kunto säännöllisesti. Kengän ulkopohjassa pitää olla riittävästi kulutus pintaa, virheetön kantakappi ja pitävät tarranauhat. Poista käytöstä ryhdytön kenkä ja hanki tilalle uudet.

Luna-pohjat: 3, 6, 8, 12 mm ■ Vakio Luna-pohja 6 mm

- Luna pohjallinen voidaan liimata kokonaan kiinni (ei irtoa mm. pesun yhteydessä) tai ns. tarraliimauksena reunoilta, jolloin pohjallinen irtoaa helposti ja siihen on helppo tehdä yksilöllisiä kevennyksiä.
- Lisäkevennyksenä luna pohjan päälle, suositellaan käytettäväksi Poron-pohjallista.
- Hoitokenkä, sopii molempiin jalkoihin. Voidaan tilata myös vasemman tai oikean kengän tarroituksella.
- Muista mainita tilauksen yhteydessä luna-pohjallisen paksuus sekä liimaustapa: kiinteä vai tarraliimaus.

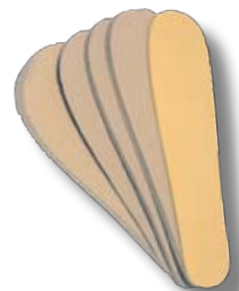

Kuvasarja kevennyksen tekemisestä Pirka hoitokenkään



1 Poista pohjallinen kengästä.



2 Merkitse alue esim. huulipunalla.



3 Merkitse / siirrä merkki pohjalliseen.



4 Valmista kuoppa.




5 Täytä kevyesti pumpulilla.



6 Peitä esim. kangaslaastarilla.



7 Laita pohjallinen kenkään.

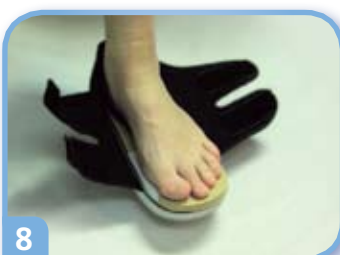

8 Tarkista, että kaikki on O.K.



9 Pirka hoitokenkä valmiina käyttöön.

Hoitokengän tulisi olla jokaisessa hoitopaikassa potilaan saatavilla, kun painehaava on todettu. Oikeaoppisella kevennyshoidolla saadaan paras mahdollinen hoitotulos. Keventävällä tukipohjallisella vähennetään jalkapohjan kiputilaa tai ihovaurioon kohdistuvaa painetta.

Hoitokengän käyttö nopeuttaa haavan paranemismahdollisuuksia. Hoitoaika lyhenee ja potilas pystyy liikkumaan omatoimisesti.

Hoitokengillä saadaan myös taloudellisia säästöjä.

MYYNТИ JA ESITTELYT:

Finbort Oy
Itsenäisyydenkatu 12–14
33500 Tampere
Puh. 0400 840 575
Fax. (03) 261 7115
finbort@elisanet.fi
www.finbort.fi

VALMISTAJA:

Oriveden Pirka-Kenkä Ky
Eevantie 2A
35320 Hirsilä
Puh. (03) 334 1951
info@pirka-kenka.com
www.pirka-kenka.com